

# MyWatch

## Manuale e specifiche tecniche

---

Grazie per aver scelto MyWatch, lo smartwatch che permette di monitorare costantemente i parametri vitali di persone anziane, disabili e non solo. Il MyWatch è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.



[www.myvirtuosohome.com](http://www.myvirtuosohome.com)  
[www.smartdhome.com](http://www.smartdhome.com)

**SmartDHOME**

# MyWatch

## Manuale e specifiche tecniche

### Descrizione e Specifiche Tecniche

---

Lo Smartwatch MyWatch è un dispositivo indispensabile per monitorare i parametri vitali come battito cardiaco e pressione sanguigna. Esso, grazie al protocollo 4G, funziona anche se molto distante dal gateway MyVirtuoso Home.



### Specifiche Tecniche

- Dimensioni: 46mm x 40mm x 15mm
- Peso: 48g
- Pulsanti: 1 pulsante (power and SOS)
- Display: 1.3" 240 x 240 pixels
- Touch: G+F Single point touch
- Batteria: 500 mAh
- Protocolli: Wi-Fi, 4G
- GPS Antenna: antenna ceramica attiva ad alta sensibilità
- GSM Antenna: antenna GSM a 4 frequenze
- SIM card: 1 nano SIM
- Resistenza all'acqua: IP67
- Vibrazione: si
- Microfono: si
- Audio: si
- Chiamate: si
- Camera: si
- Ricarica: attraverso il connettore magnetico
- Temperatura di funzionamento: -20 -> 70°C
- Umidità di funzionamento: 5% -> 95% (non congelabile)
- Aggiornamenti OTA: si

## **Contenuto della confezione**

- Smartwatch MyWatch.
- Manuale di Istruzioni.
- Cacciavite e pinzetta

## **Installazione**

---

### **Inserimento della SIM card**

Per poter utilizzare tutte le funzionalità dello Smartwatch MyWatch occorre inserire una SIM card all'interno del dispositivo. Per farlo è necessario utilizzare l'apposito cacciavite e l'apposita pinzetta presenti all'interno della confezione.

1. Utilizzando il cacciavite rimuovere la protezione del vano SIM.
2. Inserire quindi la nano SIM card nell'apposita fessura. La parte 'dorata' della SIM deve essere rivolta verso il display, mentre l'angolo diagonale deve essere rivolto verso l'angolo in basso a destra del display (utilizzare la pinzetta per aiutarsi in questa operazione).
3. Ripristinare la protezione del vano SIM (utilizzando il cacciavite).

Terminata questa semplice operazione è possibile accendere lo Smartwatch MyWatch e procedere con la fase di configurazione.

### **Configurazione**

Per poter utilizzare con efficacia il dispositivo è necessario svolgere la seguente procedura di configurazione:

1. Premere il pulsante On/Off sul dispositivo.
2. Spostarsi nella sezione telefono e digitare la seguente numerazione: \*##80020##\*
3. In seguito apparirà una schermata dove verrà richiesto di inserire un indirizzo IP e il numero di una porta.
4. Nella sezione IP inserire 81.201.126.82 mentre nella sezione porta inserire 8888
5. Infine premere "SET".

Dopo aver eseguito i punti sopraelencati, la procedura di configurazione può considerarsi terminata.

**ATTENZIONE!** Dopo aver terminato la configurazione, è fortemente consigliato di configurare anche l'opzione di rilevamento delle cadute nelle impostazioni dello Smartwatch MyWatch.

## **Rilevazione cadute**

---

Per motivi di risparmio energetico l'opzione di rilevazione delle cadute (e l'invio del corrispettivo allarme) è disattivata di default. Per abilitarla occorre navigare il menù come di seguito:

### **Di più > Impostazioni > Impostazioni di caduta**

E abilitare la funzione tramite l'apposito switch. È consigliabile abilitare anche l'avviso sonoro in caso di caduta. In questo modo l'utente può facilmente accorgersi e scremare eventuali falsi positivi. Tale operazione si effettua sempre in questa pagina di menù.

È possibile regolare la sensibilità della rilevazione. Per farlo navigare il menù come di seguito:

### **Di più > Impostazioni > Impostazioni per la sensibilità dell'arme di caduta**

E regolare la sensibilità come si preferisce (6 equivale e poco sensibile, mentre 1 molto sensibile).

## **Inclusione**

---

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo verificare che esso sia acceso e seguire i seguenti step:

1. Utilizzare l'applicazione MyVirtuoso Home ES, aprire il menu per l'aggiunta di un dispositivo IP e selezionare quindi il dispositivo **"Healthwatch"**. Verrà richiesto all'utente una descrizione per il dispositivo e l'IMEI del dispositivo.
2. Inserire la descrizione preferita ed inserire il codice IMEI del dispositivo.

**NOTA:** È possibile recuperare il codice IMEI direttamente dalla confezione del dispositivo oppure dal menù delle impostazioni.

## **Smaltimento**

---

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere.

Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

## Garanzia e supporto clienti

---

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:  
<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini.  
Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



**SmartDHOME**

SmartDHOME Srl  
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)  
[info@smartdhome.com](mailto:info@smartdhome.com)  
Rev. 09/2020